

機器設定手順書



1.スマートバンド・タブレットの充電、電源を入れる

まずは、スマートバンドとタブレットの充電を行います。充電完了後、機器の電源を入れます。
スマートバンドの操作方法は下記の通りとなります。

①充電を行う

-スマートバンドの充電ケーブルはスマートバンド本体と磁石でくっつくようになっています

②電源を入れる

-スマートバンドは画面下部のボタンを長押し(3秒程度)すると電源をつけることができます




2. Wi-Fiを設定する

ヘルプケアのアプリを使用するためにタブレットでWi-Fiを利用出来るようにします。

- ①設定をクリックする
- ②ネットワークとインターネットをクリックする
- ③Wi-Fiの設定を行う

※Bluetoothがオンになっているか、インターネットが使用出来るかを確認する

1.

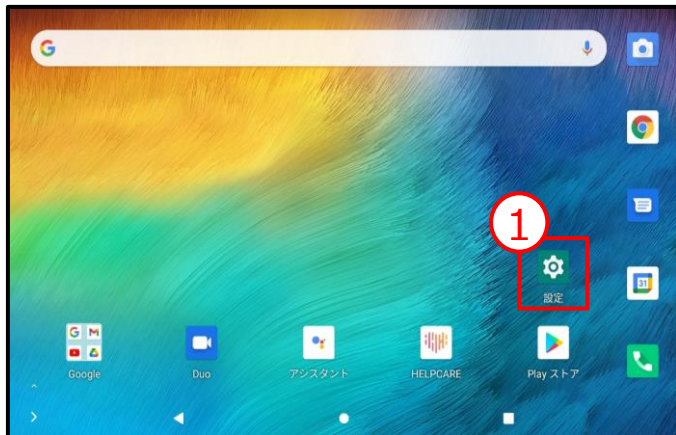

2.



3.



3.ヘルプケアアプリにログインする

ヘルプケアアプリを開くとログイン画面に遷移します。
設定して頂いたユーザー名とパスワードでログインを行います。

- ①ヘルプケアアプリを開く
- ②ユーザー名とパスワードを入力する
- ③サインインをクリックする

※ヘルプケアアプリに一度でもログインを行うと、スマートバンドのデータ収集が可能になります

※注意事項

- ・Androidはタブレット操作を全くしていないと、スリープモードになるので、定期的にログインチェック、再ログインを行うようにして下さい
- ・「セッションの有効期限切れです。」という画面に遷移した場合は、トップページへ戻るをクリックして下さい



The screenshot shows the login interface for the HELPCARE app. At the top is a logo consisting of vertical bars in purple, orange, and yellow. Below the logo, the text reads "HELPCARE" in large, bold, black letters, followed by "ヘルプケア" in smaller black letters. Underneath that is "with はやまる" in blue and green. The instruction "ユーザー名 でサインインする" is displayed. There are two input fields: "ユーザー名" and "パスワード", each with a red underline. A red button labeled "サインイン" is positioned below the fields. At the bottom, there are two lines of text: "アカウントをお持ちでない場合 [今すぐサインアップ](#)" and "パスワードを忘れた場合 [ログインができなくてお困りの方](#)".

4.ヘルプケア設定の確認

ヘルプケア内の設定を行います。

- ・基本情報の確認方法

ユーザ情報に誤りがないかなどの確認を行います

-ヘルプケア操作マニュアル(管理編)参照

- ・アラート閾値の設定

目標運動量、血圧、心拍数のアラート閾値を設定します

スマートバンドのMACアドレスが入力されていない場合はここで設定します

-ヘルプケア操作マニュアル(管理編)参照

- ・服薬時間の設定など、マスタの設定方法

-ヘルプケア操作マニュアル(管理編)参照

5.スマートバンド収集情報の確認

スマートバンドが取得した情報は15分に1回収集されます。
-ヘルプケア操作マニュアル(スタッフ編)参照


6.スマートバンドの操作方法







・基本操作

-画面遷移図参照

・MACアドレスの確認方法

- 1.メイン画面で画面下部のを軽く押す
- 2.管理画面に切り替わったら、を長押しする
- 3.画面遷移後、MACアドレスの確認が出来ます

・電源OFFの方法

- 1.メイン画面で画面下部のを軽く押す
- 2.管理画面に切り替わったら、を長押しする
- 3.画面が遷移したら、を軽く押して終了画面に切り替えます
- 4.終了画面でを長押しします

※注意事項

- ・初期化は絶対長押しNGです
- ・お風呂やシャワーの流水で画面が遷移する場合があります
- ・オプションバンド有償あります

